




## Guide de formation du kit de perfusion Cleo® 90


Veillez vous reporter au mode d'emploi pour obtenir une liste complète des indications, contre-indications, avertissements et précautions.

### POUR INSÉRER L'AIGUILLE AU NIVEAU DU SITE ET RACCORDER LA TUBULURE


1. Lavez-vous les mains et séchez-les soigneusement.

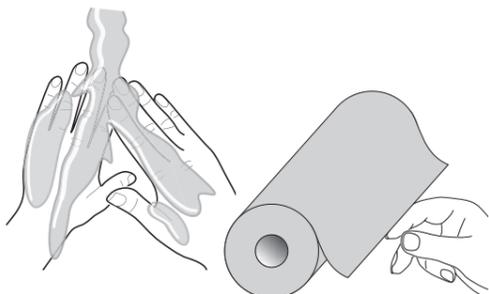


2. Préparez le site et laissez-le sécher.

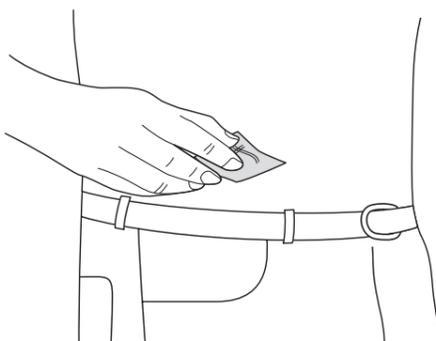


3. Tournez le capuchon pour le retirer.

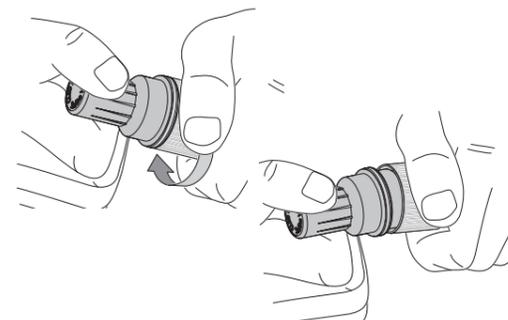


4. Inspectez le dispositif afin de repérer l'adhésif et l'aiguille d'insertion.

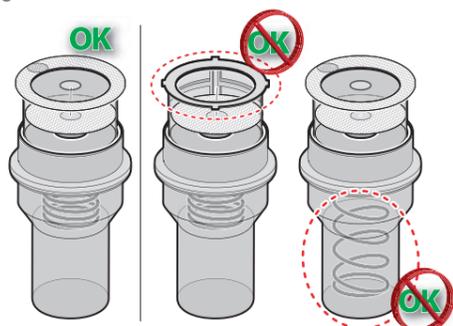


5. Appuyez fermement. Maintenez pendant cinq secondes. Retirez-le en tirant bien droit.

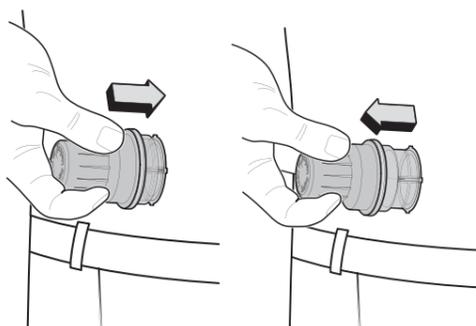


6. Appuyez pour fixer l'adhésif.

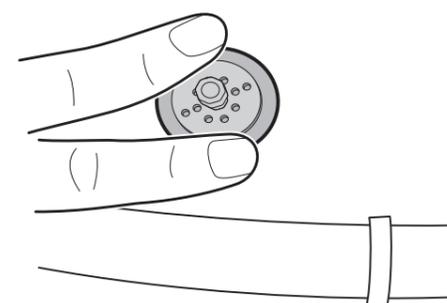


7. Raccordez la tubulure et remplissez (selon le mode d'emploi).

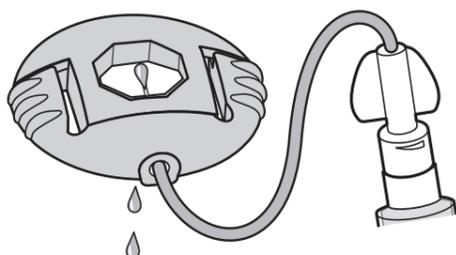


8. Pincez les bras du raccord du site vers l'intérieur et faites glisser pour ouvrir complètement.

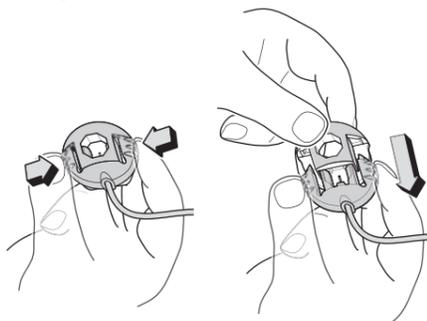

9. Fixez la tubulure sur le site en trouvant la position la plus adéquate. Le Cleo® 90 comporte huit positions possibles.

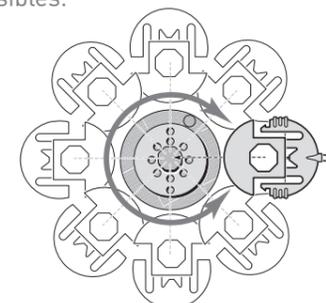


10. Fermez le raccord (un déclic sonore confirme la fermeture).

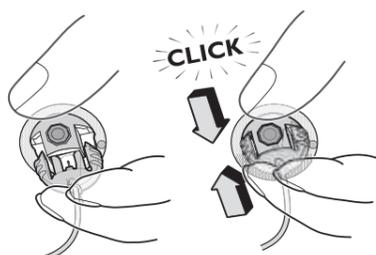


11. Remplissez la canule de médicament.

- La canule de 6 mm a un volume d'amorçage de 0,002 ml.
- La canule de 9 mm a un volume d'amorçage de 0,003 ml.

12. Vérifiez que l'aiguille s'est rétractée.


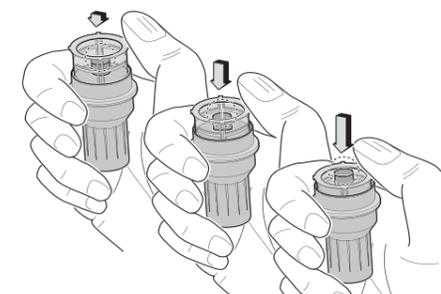


### DÉBRANCHEMENT

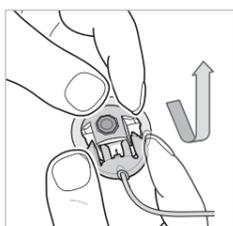

Ouvrez le raccord en pinçant les bras du raccord du site vers l'intérieur et en faisant glisser pour ouvrir complètement.

### RETRAIT DU SITE D'INJECTION

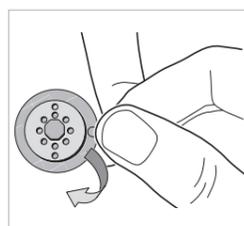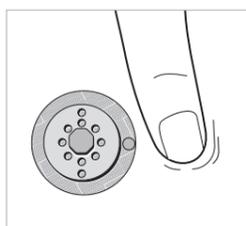

### REPLACEMENT DU CATHÉTER CLEO® 90

Remplacez le cathéter selon la politique et les procédures de votre établissement.