

### GEBRAUCHSANWEISUNG



**1 Zusammenbau Ihres Behälters**  
Richten Sie die Fülllinie und das Etikett nach vorne aus.



**2 Es sind nur vier Klicks nötig**  
Vier hörbare Klickgeräusche an jeder Ecke des Deckels bestätigen, dass Deckel und Auffangkorb korrekt und sicher zusammengebaut sind.



**3 Das Etikett vor der Anwendung ausfüllen**  
Dadurch wird eine permanente Nachverfolgung gewährleistet.




**4 Niemals über die Linie befüllen**  
Tauschen Sie Ihren Kanülenabwurfbehälter sofort aus, wenn er voll ist, um das Risiko von Nadelstichverletzungen zu vermeiden.



**5 Vorübergehendes Verschließen**  
Zum Befestigen des Deckels drücken Sie diesen vorsichtig nach unten, bis die Öffnung abgedeckt ist. Zum Lösen ziehen Sie die Lasche zurück und heben Sie den Deckel an, bis er in einer geöffneten Position einrastet.



**6 Endgültiges Schließen**  
Wenn der Behälter voll ist, verschließen Sie diesen dauerhaft. Drücken Sie dazu auf dem vorübergehend verschlossenem Behälter den Deckel fest nach unten, bis ein Klickgeräusch zu hören ist.

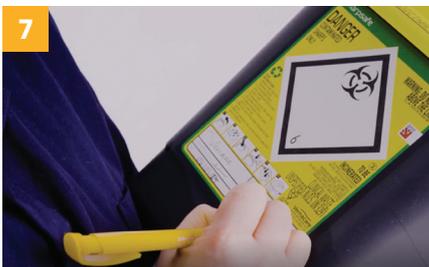

**7 Endgültige Entsorgung**  
Füllen Sie das Entsorgungsetikett aus und befolgen Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften für Kanülenabwurfbehälter.

**Für mehr Sicherheit heute und mehr Nachhaltigkeit morgen**

1 Western Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NB, Vereinigtes Königreich  
+44 (0)1204 529494 hello@vernacare.com vernacare.com

Da wir uns beständigen Verbesserungen verpflichtet haben, behalten wir uns das Recht zu unangekündigten Änderungen vor. © Copyright Vernacare International Limited 2024. Alle Rechte vorbehalten. CWM015 REV00



HERGESTELLT IN GROSSBRITANNIEN

# Vernacare

**Klinisches  
Abfallmanagement**