

### MODE D'EMPLOI




**1**

**Pour assembler votre collecteur**  
Placez le collecteur de manière à ce que la ligne de remplissage et l'étiquette soient face à vous.



**2**

**Assemblage en quatre clics**  
Quatre clics audibles de chaque côté du couvercle garantissent l'assemblage correct et sécurisé du couvercle et de la cuve.

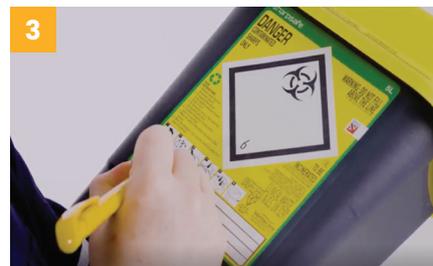

**3**

**Remplir l'étiquette avant utilisation**  
Cela permet d'assurer une traçabilité permanente.



**4**

**Ne jamais remplir le collecteur au-delà de la ligne**  
Une fois plein, remplacez toujours votre collecteur pour objets tranchants afin d'éviter les blessures par piqûre d'aiguille.




**5**

**Fermeture provisoire**  
Pour l'enclencher, appuyez doucement sur le couvercle jusqu'à ce que l'ouverture soit recouverte. Pour réouvrir, tirez sur la languette et soulevez le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position ouverte.



**6**

**Fermeture définitive**  
Une fois plein, il convient de fermer le collecteur définitivement. Lorsque la fermeture provisoire a été actionnée, appuyez fermement sur le couvercle jusqu'à entendre un clic audible.

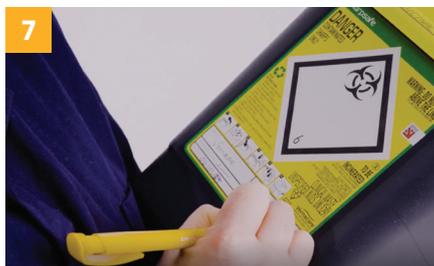

**7**

**Élimination définitive**  
Remplissez l'étiquette et suivez les directives de mise au rebut locales destinées aux collecteurs pour objets tranchants.

## Plus sécurisé et plus durable.

1 Western Avenue, Matrix Park, Buckshaw Village, Chorley, PR7 7NB, Royaume-Uni  
+44 (0)1204 529494 hello@vernacare.com vernacare.com

En raison de notre politique d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les modèles sans notification préalable. © Copyright Vernacare International Limited 2024. Tous droits réservés. CWM015 REV00



FABRIQUÉ EN  
GRANDE-BRETAGNE

# Vernacare

Gestion des déchets  
cliniques