


HOSPITAL CARE

Terumo-Spritze

Dreiteilige Spritze ohne Kanüle

Produktinformationen

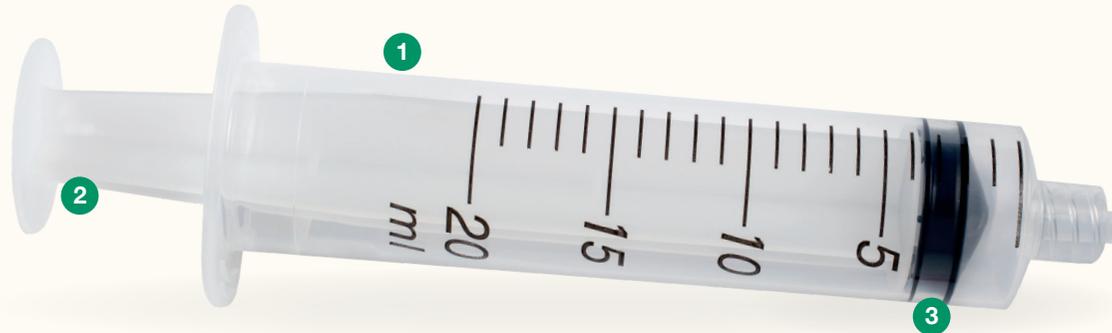

Einwegspritzen für den einmaligen Gebrauch

Jedes Detail ist das Ergebnis der langjährigen Erfahrung von Terumo auf diesem Gebiet, die von Anwendern auf der ganzen Welt geschätzt wird.

- Silikonisierung für eine optimale Kolbenbewegung
- Fühlbar definierter Kolbenanschlag
- Klare Skalierung für eine präzise Dosierung
- Transparenter Zylinder zur optischen Kontrolle
- Fingergriffe für eine leichtere Handhabung

Beschreibung	Verwendete Materialien
1 Zylinder	Polypropylen
2 Kolben	Polypropylen
3 Dichtung	Thermoplastisches Elastomer (für „SS“-Artikelnummern) Polyisopren-Gummi (für „MDSS“-Artikelnummern)
Gleitmittel	Silikonöl

Enthält keine Bestandteile aus PVC oder Naturkautschuklatex

Sterilisation

Mit Elektronenstrahlsterilisation (für „SS“-Art.-Nr.) oder Ethylenoxid (für „MDSS“ Art.-Nr.) bis zu einem Sterilisierungsvertrauensgrad von mindestens 10^{-6}

Lagerung

- Haltbarkeit bis zu 5 Jahren
- Die Chargennummer und das Verfallsdatum sind auf das Papier gedruckt (bei „MDSS“-Codes) oder in die Folie der Blisterpackung eingepreßt (bei „SS“-Codes).
- Nicht bei extremer Temperatur und Luftfeuchtigkeit lagern (für „MDSS“- und „SS“-Codes) oder zwischen 2°C und 30°C lagern (für „SS+“-Codes)

Produktsortiment

Product Code	Kapazität		Inkrement	Konus	Ersatz für
	Nominal	Graduiert			
MDSS01SE	1 ml	1 ml	0.01 ml	Konzentrisch Luer-Slip	SS+01T1
SS*02LE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS*02SE1	2.5 ml	2.5 ml	0.1 ml	Konzentrisch Luer-Slip	-
MDSS03SE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Konzentrisch Luer-Slip	SS*02SE1, SS+03S
MDSS03LE	3 ml	3 ml	0.1 ml	Konzentrisch Luer-Lock	SS*03L, SS+03L1
MDSS05SE	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Slip	SS*05SE1, SS+05S
MDSS05LE ¹	5 ml	5.5 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS*05LE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS*05SE1	5 ml	6 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Slip	-
MDSS10SE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Slip	-
MDSS10ESE	10 ml	11 ml	0.2 ml	Exzentrisch Luer-Slip	SS+10ES1
MDSS10LE ¹	10 ml	11 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS*10LE1	10 ml	12 ml	0.2 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
MDSS20ESE	20 ml	22 ml	1 ml	Exzentrisch Luer-Slip	SS+20ES1
MDSS20LE ¹	20 ml	22 ml	1 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS+20L1	20 ml	25 ml	1 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS+30ES1	30 ml	35 ml	1 ml	Exzentrisch Luer-Slip	-
SS+30L1MP	30 ml	35 ml	1 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS+50L1	50 ml	60 ml	1 ml	Konzentrisch Luer-Lock	-
SS+50ES1	50 ml	60 ml	1 ml	Exzentrisch Luer-Slip	-
SS+50C1	50 ml	60 ml	1 ml	Katheteransatz	-



STERILE EO „MDSS“-Artikelnummern
STERILE R „SS“-Artikelnummern

¹ Diese konzentrische Luer-Lock Ausführung ist nicht für die Verwendung mit Spritzenpumpen geeignet.

Verpackung

Verpackungseinheit	Versandkarton		
	Stück	Gewicht	Maße (L x B x H)
100	3000	12.70 kg	635 x 295 x 505 mm
100	2400	10.40 kg	397 x 581 x 444 mm
100	2400	9.30 kg	394 x 581 x 444 mm
100	1800	10.30 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	11.10 kg	445 x 447 x 449 mm
100	1800	12.80 kg	656 x 419 x 426 mm
100	1800	13.20 kg	655 x 418 x 426 mm
100	1600	10.60 kg	412 x 573 x 444 mm
100	1600	10.40 kg	411 x 576 x 444 mm
100	1200	13.00 kg	575 x 455 x 455 mm
100	1200	14.20 kg	568 x 496 x 460 mm
100	1200	13.00 kg	575 x 455 x 455 mm
100	800	15.00 kg	359 x 581 x 383 mm
50	400	8.30 kg	468 x 390 x 455 mm
50	400	8.10 kg	465 x 380 x 445 mm
50	600	9.90 kg	468 x 390 x 455 mm
25	200	6.30 kg	560 x 398 x 255 mm
25	200	6.20 kg	558 x 395 x 254 mm
25	100	5.10 kg	464 x 320 x 275 mm
25	100	5.10 kg	472 x 324 x 282 mm
25	100	5.30 kg	472 x 324 x 282 mm

Einzelverpackung: Blisterpackung
(Folie/Folie für „SS“-Codes und Folie/Papier für „MDSS“-Codes)

Regulierungsstatus

Klasse IIa, steriles Produkt

Benannte Stelle
TÜV Rheinland 0197

Hersteller
für „SS+“-Artikelnummern TERUMO (Philippinen) CORPORATION, 124 East Main Avenue, Laguna Technopark, Binan, Philippinen
für „SS“-Artikelnummern TERUMO CORPORATION, 2-44-1 Hatagaya, Shibuya-Ku, Tokyo 151-0072, Japan
für „MDSS“-Artikelnummern Yangzhou Medline Industry Co., Ltd. (China)

EU-Vertreter
für „SS“-Artikelnummern TERUMO EUROPE N.V. – Leuven, Belgien
für „MDSS“-Artikelnummern Shanghai International Corp. GmbH (Europe) – Hamburg, Deutschland

Vertrieb
für „MDSS“-Artikelnummern TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 Leuven, Belgien

Sicherheitshinweise

- Nicht verwenden, wenn das Produkt beschädigt ist.
- Produkt nicht wiederverwenden.
- Scharfe Gegenstände sind nach einmaligem Gebrauch gemäß den Vorschriften zu entsorgen, um Infektionsrisiken zu vermeiden.

Konsultieren Sie immer das Produktetikett, um einen vollständigen Überblick über die Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und/oder Sicherheitsvorkehrungen vor der eigentlichen Verwendung zu erhalten.

Auswahlmöglichkeit an Volumen zwischen 1 ml und 50 ml

Die Spritzen sind mit allen gängigen Konustypen erhältlich.

Ihr Terumo-Partner



TERUMO EUROPE N.V.

Terumo Corporation +81 3 6742 8500
Terumo Europe N.V. +32 16 38 12 11

www.terumo-europe.com

Alle Markennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von TERUMO CORPORATION, ihrer Tochtergesellschaften oder unabhängiger Dritter. Veröffentlicht von Terumo Europe N.V.

Bitte beachten Sie, dass einige Produkte möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar sind. Wenden Sie sich an Ihren Terumo-Ansprechpartner vor Ort.