

Empfohlene Verwendung subkutaner Einmalspritze



Beschreibung:

Unterhautspritze zur Einmalverwendung. Steril, ungiftig, nicht pyrogen.

Anwendung:

Für eine Injektion und Entnahme von Körperflüssigkeiten, Blutentnahme von Patienten. Bei FNA und FNNA sind dreiteilige Spritze von CHIRANA zu empfehlen.

Kontraindikation:





Dieses Medizinprodukt sollte zu keinen anderen als dafür bestimmten Zwecken verwendet werden. Dieses Medizinprodukt ist nicht für hochviskose Flüssigkeiten zu gebrauchen.



1. Vor der Verwendung ist die Sterilität, Verpackungsvollständigkeit, Chargennummer und Ablaufdatum zu prüfen;
2. Die Spritze ist sofort nach dem Öffnen der Einzelverpackung zu verwenden und nach der Verwendung umgehend zu entsorgen;
3. Die Spritze ist nicht mehr zu verwenden, falls eine Einzelverpackung beschädigt oder das Datum abgelaufen ist;
4. Spritze ist nur vom Facharzt oder Gesundheitspersonal zu verwenden;
5. Nur zu einmaliger Verwendung. Nach der Verwendung ist die Spritze sofort zu entsorgen;
6. Medizinprodukt ohne DEHP-Phthalate;
7. Erneute Sterilisation oder wiederholte Verwendung kann zu einer Infektion oder gegenseitiger Kreuzwirkung führen;
8. Falls Inhalt der Spritze trüb, verfärbt oder mit einer Festsubstanz, die Spritze ist nicht mehr zu verwenden, der Hersteller ist sofort darüber zu informieren und falls möglich die Spritze an den Hersteller zu senden.



1. Vor der Verwendung die Einzelverpackung prüfen. Das Medizinprodukt nicht verwenden, falls die Einzelverpackung beschädigt ist!
2. Einzelverpackung vor der Verwendung öffnen;
3. Jede gebrauchte Spritze ist kontaminiert und deshalb in einen separaten biologischen Abfall zu entsorgen, um eine Infektion zu vermeiden;
4. Nach Einmalverwendung ist die Spritze sorgfältig zu entsorgen, um eine Infektion zu vermeiden.

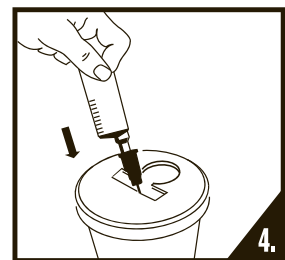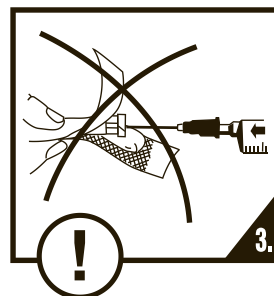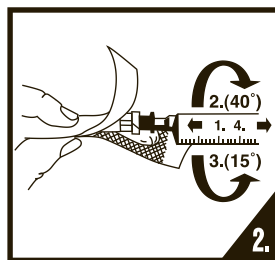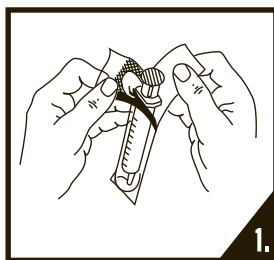

Vorsicht



Siehe Gebrauchsanweisung



Produkt-Referenznummer



Zur einmaligen Verwendung



Chargennummer



Herstellungsdatum



Verbrauchen bis/Datum des Verbrauchs



Mit Ethylenoxid sterilisiert



Hergestellt in



Ohne Pyrogen



Produkt ohne LATEX



Verwenden Sie das Gerät nicht, falls das Einheitspaket beschädigt ist.



Vor Sonnenlicht schützen



Temperaturbegrenzung



Vor Regen schützen



Zerbrechlich, vorsorgliche Handhabung

