

Chirana

Le mode de l'utilisation recommandé d'une seringue hypodermique disponible à usage unique






- Description:** Seringues hypodermiques disponibles à usage unique. Stériles, non toxiques, non pyrogènes.
- Objet de l'utilisation:** Les présentes seringues hypodermiques disponibles à usage unique sont destinées à l'administration des injections et la prise de sang et des liquides organiques des patients.
- Contre-indication:** Au cas des procédés FNA et FNNA nous recommandons l'utilisation des seringues CHIRANA à trois pièces. Le présent instrument médical ne puisse être utilisé qu'aux fins de l'utilisation mentionnées ci-dessus. Le présent instrument médical ne puisse pas être utilisé pour une liquide de très haute viscosité.



1. Avant l'utilisation vérifiez la validité de la stérilité, si le pack est complet et vérifiez aussi le numéro de dose et la date d'expiration;
2. Il est inévitable d'utiliser les présentes seringues immédiatement après l'ouverture du pack et de les détruire immédiatement après l'utilisation de celles-ci;
3. Au cas que le pack est endommagé ou après la date d'expiration, il est strictement interdit de l'utiliser;
4. C'est uniquement un médecin ou un infirmier ou infirmière qui sont autorisés d'utiliser les seringues hypodermiques mentionnées ci-dessus;
5. Les présentes seringues sont destinées uniquement pour l'usage unique. Il est inévitable de détruire l'ensemble des seringues immédiatement après l'utilisation de celui-ci;
6. Le présent instrument médical ne contient pas des phtalates DEHP;
7. La stérilisation répétée ou la réutilisation puissent causer l'infection ou l'effet croisé mutuel;
8. Au cas qu'après avoir rempli la seringue la solution devient trouble, colorée ou les particules solides apparaissent, arrêtez l'utilisation de la seringue, informez le fabricant et si c'est possible, envoyez la présente seringue au fabricant.



1. Avant l'utilisation vérifiez l'intégrité de tous les packs. Au cas qu'un des packs est endommagé, il est interdit de l'utiliser!
2. Avant l'utilisation ouvrez le pack;
3. Toute seringue une fois utilisée est considérée comme la seringue contaminée. Il est inévitable de la détruire immédiatement après l'utilisation de celle-ci dans un conteneur approuvé destiné aux bio déchets pour prévenir l'infection;
4. Il est inévitable de détruire immédiatement la seringue après la première utilisation de celle-ci pour prévenir l'infection.

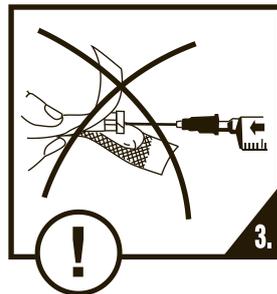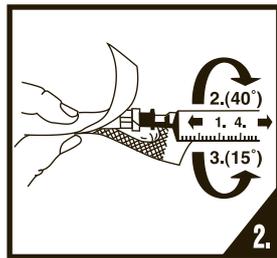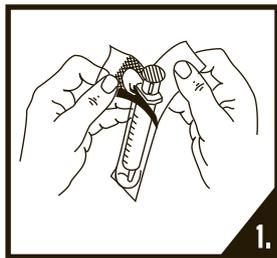

	Avertissement		Le produit ne contient pas de LATEX
	Consulter le mode d'emploi		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Numéro de catalogue		Protéger du soleil
	Ne pas réutiliser		Limites de température
	Code de dose		Stocker dans des locaux secs
	Date de fabrication		Fragiles, manipuler avec du soin
	Utilisable au		
	Stérilisé par l'oxyde d'éthylène		
	Fabricant		
	Non pyrogène		