

# Chirana

## Utilizzo della siringa monouso



**STERILE EO**




- Descrizione:** Siringhe monouso. Sterili, atossiche, apirogene.
- Motivo di utilizzazione:** Per somministrare iniezioni e prelevare sangue e fluidi corporei dei pazienti. In sede delle procedure FNA e FNNA raccomandiamo l'utilizzo di siringhe in 3 parti CHIRANA.
- Controindicazioni:** Dispositivo medico non dovrebbe essere usato in un modo diverso da quello riportato. Dispositivo medico non dovrebbe essere usato per liquidi altamente viscosi.



1. Prima di utilizzo verificare la data scadenza di sterilità, integrità dell'imballaggio, numero di lotto e data di scadenza;
2. Siringhe possono essere utilizzate soltanto in seguito all'apertura della confezione unitaria e in seguito all'utilizzo devono essere smaltite;
3. Qualora sia danneggiata la confezione unitaria oppure sia già scaduta, non è permesso l'utilizzo della stessa;
4. Utilizzarlo può esclusivamente il dottore o paramedico qualificato;
5. Monouso. In seguito all'utilizzo il kit deve essere subito smaltito;
6. Il presente dispositivo medico non contiene ftalati DEHP;
7. Sterilizzazione o utilizzo ripetuto può causare l'infezione o una reazione incrociata vicendevole;
8. Qualora in seguito al riempimento della siringa la soluzione si intorbidisce, colora oppure appariranno particelle, non utilizzare la siringa, informate il produttore e qualora possibile, inviate la siringa al produttore.



1. Prima di utilizzo verificare l'integrità di ogni singolo imballaggio. Qualora la confezione unica sia danneggiata, non utilizzarlo!
2. Prima di utilizzo aprite la confezione unica;
3. Ogni siringa utilizzata viene considerata contaminata e deve essere immediatamente in seguito al suo utilizzo smaltita in approvato contenitore per rifiuti biologici per prevenire all'infezione;
4. In seguito all'utilizzo lo smaltite in un modo sicuro perché prevenga all'infezione.

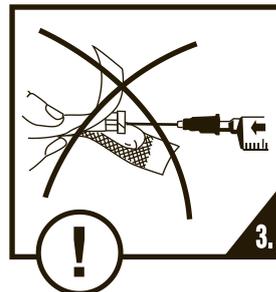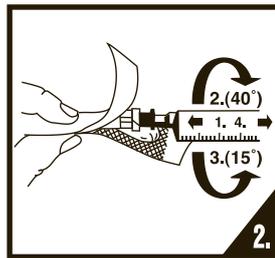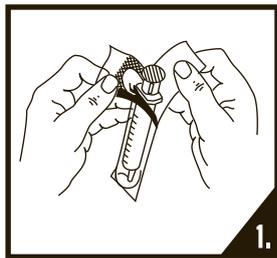

Avvertimento



Vedi Istruzioni per l'uso



Numero di catalogo



Non utilizzare ripetutamente



Codice lotto



Data di produzione



Data di scadenza



Sterilizzato con etilenoossido



Produttore



Apirogene



Prodotto non contiene LATEX



Non utilizzare se è imballaggio danneggiato



Proteggere dalla luce del sole



Temperature consentite



Conservare all'asciutto



Fragile, maneggiare con cura

